

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ZOZ/ZSZ Nr IV. 2/33/S

Wydanie: 1

Strona 1 z 2

1. Nazwa zakładu Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu	2. Data opracowania dokumentu 20.04.2015 r.	3. Data rozpoczęcia obowiązywania dokumentu 02.05.2016 r.	4. Numer wydania 1
4. Numer i nazwa opisywanej instrukcji INSTRUKCJA STANOWISKOWA ZOZ/ZSZ Nr IV. 2/33/S STOSOWANIA LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH			

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

Ukończenie wieku 18 lat oraz posiadanie przez pracownika:

- Ważnych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.
- Ważnego szkolenia stanowiskowego BHP potwierdzającego praktyczną znajomość obsługi maszyny.

Stosowanie instrukcji obsługi, instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy, potwierdzone pisemnie przez pracownika.

Stosowanie sprawnych i odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy środków ochrony indywidualnej: okulary i rękawice ochronne oraz wyspecjalizowane osłony ciała.

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia (sala chorych, sala zabiegowa, gabinet lekarski, zabiegowy) stosować zgodnie z medycznymi standardami postępowania technikę i czas naświetlania.

Stosowanie lamp bakterioobójczych pociąga za sobą konieczność ochrony skóry i oczu ludzi przebywających w pomieszczeniach, w których pracują lampy.

Pomimo zastosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, ekspozycja pracowników na promieniowanie UV należy minimalizować najbardziej jak to tylko możliwe.

Wyłączniki lamp winny być opatrzone napisami ostrzegawczymi.

Lampy winny być oznaczone napisem „Uwaga! - Promieniowanie UV-C – Chronić oczy i skórę”.

Gniazdo zasilające musi być wyposażone w otwór bolca uziemiającego kabla zasilającego.

Każdorazowo po użyciu lampy należy odnotować czas i datę jej uruchomienia, w przeznaczonym do tego zeszytce.

Raz w miesiącu należy oczyścić lampę z kurzu i brudu osadzającego się na promiennikach i odbłyśnikach, za pomocą suchej i miękkiej tkaniny. W razie konieczności można zastosować spirytus.

Należy wymieniać regularnie promienniki, każdorazowo po upływie wyznaczonego przez producenta okresu czasu.

PRZYGOTOWANIE STANOWISKA PRACY

Sprawdź stan techniczny lampy, zarówno źródła światła, jak i osłony, oraz widocznej instalacji elektrycznej.

Sprawdź czystość lampy, odbłyśnika i promiennika.

Włącz zasilanie (podłącz przewód zasilający do gniazdka kontaktowego).

ZAKOŃCZENIE PRACY NA STANOWISKU

Wyłącz urządzenie głównym wyłącznikiem.

Wymij wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Skontroluj stan techniczny urządzenia.

Odnótuj pracę lampy (data i czas trwania naświetlenia).

Zabezpiecz urządzenie przed uszkodzeniem, zabrudzeniem oraz dostępem do niego osób niepowołanych (w przypadku lamp przenośnych).

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Przekraczanie dopuszczalnego czasu ekspozycji przez pracownika wykonującego prace w narażeniu na promieniowanie UV-C.

Nie stosowanie przewidzianych środków ochrony osobistej podczas pracy w narażeniu na promieniowanie UV-C.

Podłączanie, bądź odłączanie przewodu zasilającego mokrymi bądź wilgotnymi rękoma.

Używanie urządzenia zawilgoconego, bądź mokrego.

Dokonywanie samodzielnych instalacji, adaptacji i napraw, jak również eksploataowanie urządzenia noszącego znamiona uszkodzenia.

Czynności te mogą być dokonywane jedynie przez autoryzowany personel bądź serwisanta.


ZASTOSOWANE PIKTOGRAMY

Wykaz znaków bezpieczeństwa, zgodnych z normami PN-93/N-01256/03 oraz ISO 7010 jakimi winno zostać oznaczone urządzenie/stanowisko pracy w celu zwiększenia świadomości i bezpieczeństwa pracownika wykonującego zlecone zadania.

ZNAKI ZAKAZU



ZNAKI OSTRZEGAWCZE

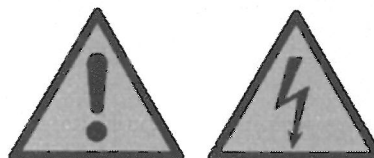

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości stanu technicznego należy:

- Natychmiast wyłączyć urządzenie.
- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Powiadomić o zdarzeniu przełożonego.
- Umieścić na urządzeniu informację:

„UWAGA AWARIA – NIE ZAŁĄCZAĆ”

W przypadku zauważenia dymu, ognia, zapachu swądu lub innych objawów należy:

- Natychmiast wyłączyć urządzenie,
- Zaalarmować współpracowników i przełożonych.
- Podjąć próbę ugaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.
- Powiadomić służby ratowniczo-gaśnicze

Numer Alarmowy: 112 lub 998

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.

Bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku pracownikowi, natychmiast po upewnieniu się że jest już bezpiecznie.

Opracował (imię i nazwisko, stanowisko, podpis)

KIEROWNIK
Laboratorium Mikrobiologicznego

mgr biol. Anna Ochmańska
.....
specjalista mikrobiologii medycznej

Sprawdził (imię i nazwisko, stanowisko, podpis)

mgr Łukasz Kmieć

mgr Łukasz Kmieć
.....
Specjalista ds. BHP

Zatwierdził (imię i nazwisko, stanowisko, podpis)

Dyrektor
ZOZ w Oświęcimiu

mgr Sabina Dęges-Jaworowska
.....
mgr Sabina Dęges-Jaworowska